









	Código/ Code: FT-BOLSASFRIOINSTANTÁNEO- 20170207	Edición/ Issue: 1	Página/ Page: 1/1			
	Ficha Técnica <i>Technical Data Sheet</i>					
BOLSAS FRIO INSTANTÁNEO/ INSTANT COLD PACK						
Característica(s) principal(es)/ Main feature(s)	Bolsas de frío instantáneo sin refrigeración / Instant cold pack without refrigeration.					
Material(es)/ Material(s)	Composición del contenido: Agua, urea. Content composition: Water, urea.					
Descripción del producto/ Product description	Uso sencillo e inmediato / Easy and immediate use. El frío oscila los 0°C en pocos segundos, llegando a alcanzar -10°C durante 30 minutos/ It gets 0°C in few seconds, and it reaches -10°C during 30 minutes. Adaptable, no se endurece / Adaptable, it does not harden. Frío seco sin goteo. Bolsas herméticamente cerradas con doble termosellado / Cold dry without dripping. Hermetically sealed packs with double heat sealing. No requiere preenfriamiento ni almacenaje especial / No precooling or special storage required. Uso único / Single use. Indicado para cualquier edad / Suitable for any age. Peso bolsas / Pack weight: 200 g Complemento perfecto a analgésicos y anti-inflamatorios / Perfect complement to analgesics and anti-inflammatories.					
Recomendaciones de uso/ Recommendations for use	Golpear o estrujar con fuerza el paquete para perforar la bolsa interna de agua. Sacudir enérgicamente durante unos segundos. Aplicar sistemáticamente un trapo o toalla entre la bolsa y la zona a tratar. Desechar después de su uso. No aplicar directamente sobre la piel. No perforar ni abrir la bolsa, tampoco después de utilizarla. Utilizar la bolsa únicamente si está bien cerrada / <i>Hitting or squeezing the pack tightly to pierce the inner water bag. Shake vigorously for a few seconds. Apply a cloth or a towel systematically between the pack and the area to be treated. Discard after use. Do not apply directly on the skin. Do not pierce or open the bag after use. Use the bag only if it is tightly closed.</i>					
Uso previsto/ Expected use	Calma y atenúa el dolor por la acción del frío. Recomendada para golpes, esguinces, hematomas, luxaciones, picaduras de insectos, inflamaciones e insolaciones / <i>It calms and attenuates the pain by cold action. Recommended for bumps, sprains, bruises, dislocations, insect bites, inflammations and sunstrokes</i>					
Información comercial/ Commercial information	Ref./REF.	Medidas (cm)/ Measures(cm)	Color/ Color	Envase individual/ Individual packaging	Contenido cajas/ Box content	EAN
	41024	14,8 x 20,8 (largo x ancho/ length x width)	Blanco y azul/ White and blue	No/ No	48	---
Precauciones de transporte y almacenamiento/ Transport and storage warnings	Conservar en lugar fresco y seco en recipientes bien cerrados. Almacenar lejos de alimentos / <i>Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles. Store away from foodstuffs.</i>					
Gestión de la calidad/ Quality management	<i>Council Directive 93/42/CEE concerning medical devices</i> Marcado CE en cada envase. CE marking on each packaging level. Clasificación según Anexo IX del RD 1591/2006: Clase IIa/ CE classification according to RD 1591/2006: Class IIa.					
Vida útil/ Shelf life	 3 años / 3 years.					
Simbología aplicable/ Applicable symbols	   					
Fecha última actualización/ Date of last updating	Febrero 2.017/ February 2.017					
	Contacto/ Contact			 tienda@fisaude.com  www.fisaude.es  + 34 916 32 77 40.		



PORTALWEB FISAUDE SL
B32403495
Calle Constitución 124
28946 Fuenlabrada, Madrid
91 632 77 40
tienda@fisaude.com