



CUIDADOS DE LA SONDA RECTAL.

Con dos electrodos para el control de los músculos del suelo pélvico y para el tratamiento de la incontinencia urinaria (IU) y/o incontinencia fecal (IF)



PR-06A



Length 83mm

IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR:
Suministros Lumadam S.L
C/ Iglesia 4-6
16770- San Lorenzo de la Parrilla.
Cuenca- España



MDSS GmbH
Schiffgraben 41, 30175
Hannover, Germany.



Everyway Medical Instruments Co., Ltd.
3F., No.5, Ln. 155, Sec. 3, Beishen Rd.,
Shenkeng Dist., New Taipei City 22203, Taiwan.



Modo de uso:



La sonda intracavitaria es para un único usuario. Debe ser limpiada con agua fría y jabón o con una toallita empapada en suero fisiológico y aclarar con agua debajo del grifo antes y después del tratamiento. Secar bien con papel. Las soluciones alcohólicas no son apropiadas para la limpieza de la sonda. La sonda no puede ser esterilizada a altas temperaturas puesto que puede deformarse. Asegurarse de que el estimulador está apagado antes de conectar o desconectar la sonda.



Contraindicaciones:

1. Disfunción muscular.
2. Cáncer cérvix
3. Si ha padecido o padece epilepsia.
4. Personas con marcapasos.
5. Embarazo.



Precauciones:

1. Mantener la sonda sin humedad y fuera de cualquier fuente de calor.
2. Nunca conectar a ningún otro aparato de alta frecuencia por riesgo de quemaduras.
3. Los efectos a largo plazo de la estimulación no han sido contrastados.
4. El uso de este aparato es para un corto periodo de tiempo.
5. No tocar las partes metálicas de la sonda una vez conectado el aparato.
6. Los electrodos de metal contienen trazas de níquel. Puede causar reacción alérgica en caso de hipersensibilidad al níquel.

Etiqueta:



La etiqueta de cada sonda contiene información importante

Por favor, no tirar a la basura!

V



