



# Kinefis Farma Press Digital 8

garantía

**kinefis**

3 años

Guía de usuario

# Kinefis Farma Press Digital 8

**Kinefis** Farma Press Digital 8 es un nuevo aparato de presoterapia para el bienestar cotidiano, dirigido tanto para uso doméstico como profesional. Está dotado de 1 salida con **8 secciones** para estimular una parte del cuerpo.

Resulta especialmente eficaz en:

**Cuidado de masaje:** Tres diferentes masajes de presión de aire en las piernas / brazos / cintura para aliviar el cansancio y mejorar la circulación sanguínea.

**Cuidado de belleza:** Para uso en el hogar puede fortalecer la elasticidad de la piel y ayudar al drenaje de células de grasa.

**Drenaje linfático:** A través de la terapia de compresión secuencial, puede mejorar la presión de los músculos para eliminar la hinchazón o el dolor y mejorar el linfedema en las extremidades.

**Terapia deportiva:** Perfecto para antes y después de los entrenamientos, así como para la rehabilitación. La terapia de compresión de aire mejora la circulación sanguínea y linfática, para proporcionar una recuperación rápida de los músculos liberando el ácido láctico acumulado.



## DOTACIÓN BASE

Trae de serie un set compuesto por dos fundas de piernas, una para brazos y una faja abdominal (las extensiones para las piernas están disponibles como opcionales). Además, incluye un **mando a distancia** para poder regular la terapia cómodamente estando sentado o mientras trata a un paciente.



cierre cómodo



agarres laterales



conexión segura




apoyo antideslizante

# Kinefis Farma Press Digital 8

## Ficha técnica

Presión ajustable	30 - 250 mmHg
Canales de salida	8 independientes
Modos de masaje	6
Pantalla	Táctil
Niveles de presión	8

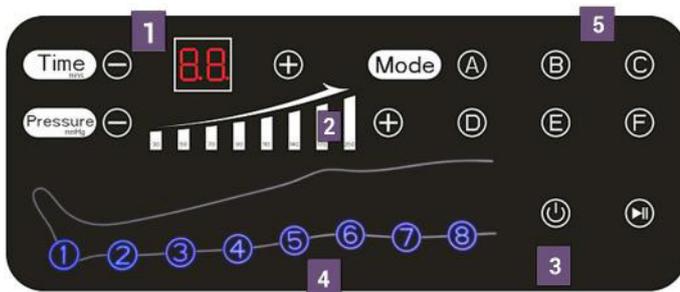

1. Temporizador: 1 - 90 min
2. Presión (mmHg): 30-50-70-90-120-150-180-250
3. Botón encendido/apagado
4. Selección de canal: 8 independientes
5. Modos de masaje: 6

## Características

El equipo es totalmente digital y la configuración de los parámetros de funcionamiento se efectúa en forma automática de acuerdo con sus programas predefinidos. No obstante, **el profesional siempre tiene el control de los valores de aplicación**, con la posibilidad de modificarlos de acuerdo a su criterio; en forma sencilla y práctica mediante su pantalla táctil.

**Las 8 cámaras se pueden encender/apagar de forma independiente**, por lo que es posible optimizar el tratamiento para músculos o áreas específicas, o evitarlo en otras, por ejemplo, heridas quirúrgicas u otras lesiones que pueden no soportar el tratamiento.

**Mando a distancia** incluido que permite configurar de forma cómoda el aparato mientras se aplica el tratamiento.


**Las aplicaciones del dispositivo son numerosas** y van desde la circulación local y periférica, a la estimulación de tipo estético para el tratamiento de la celulitis y el linfodrenaje.

# MODOS DE MASAJE

## MODO A MASAJE SECUENCIAL

La presión empieza de abajo hacia arriba. Cuando una sección se infla, la anterior se desinfla.


Este tipo de masaje mejora el trofismo tisular, al mismo tiempo que se obtiene una sensación de relax. Todo ello contribuye a producir un efecto sedante al relajarse la musculatura y mejorar la circulación local.

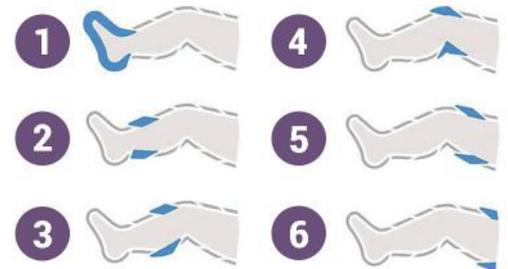

## MODO B MASAJE PERISTÁLTICO

La presión empieza de abajo hacia arriba. Todas las secuencias se desinflan al mismo tiempo al final e la secuencia de presión.


Este tipo de masaje elimina de forma natural y no invasiva, el estancamiento intersticial excesivo así como los fluidos que producen la fatiga, al mismo tiempo que acelera el retorno venoso y linfático.

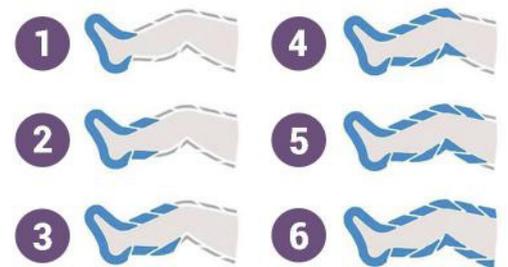

## MODO C MASAJE SECUENCIAL DOBLE

La presión empieza de abajo hacia arriba. Se inflan dos secciones a la vez de forma secuencial (cuando dos se inflan, las dos anteriores se desinflan).

Este tipo de masaje proporciona una recuperación rápida de los músculos liberando el ácido láctico acumulado.

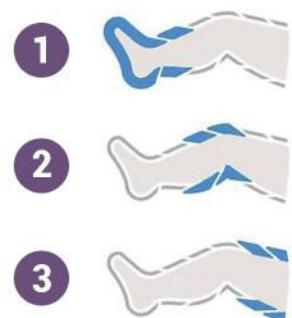


# MODOS DE MASAJE

## MODO D MASAJE INTEGRAL

Se aplica compresión y descompresión inflando y desinflando todas las cámaras a la vez.


Este tipo de masaje activa la circulación y masajea de forma profunda la musculatura, sin llegar a tener un efecto drenante.

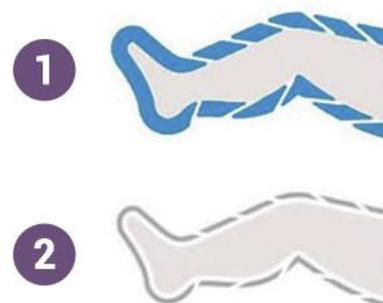

## MODO E MASAJE PERISTÁLTICO + SECUENCIAL DOBLE



## MODO F MASAJE SECUENCIAL + SECUENCIAL DOBLE + INTEGRAL

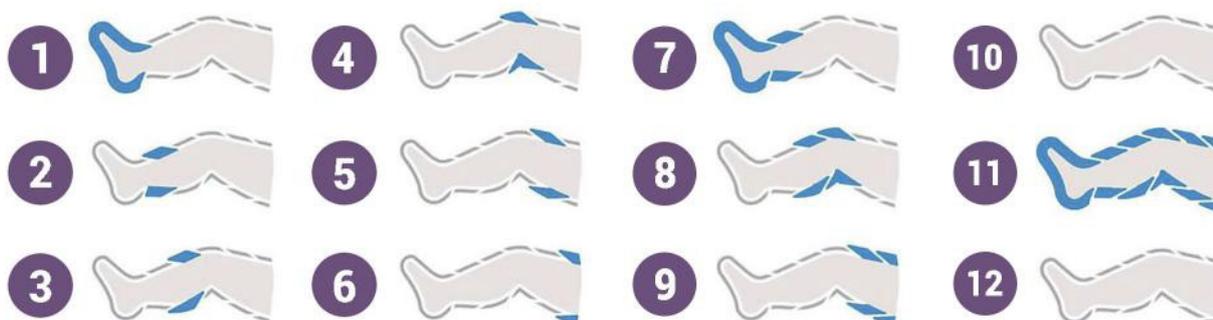

## PREGUNTAS FRECUENTES

### ■ **¿Estando embarazada puedo recurrir a este tratamiento?**

El sistema de presoterapia deja al aire el abdomen, efectuando masajes desde los pies, ayudando a eliminar los líquidos acumulados durante el embarazo, por lo que puede resultar un tratamiento muy útil en el transcurso del embarazo sobre todo los últimos meses, siempre bajo vigilancia médica. Importante: no utilizar la faja.

### ■ **¿Hay una edad límite para el uso de presoterapia?**

Este tratamiento está indicado en todas las edades, incluso es muy útil en mujeres que sufren cambios hormonales debido a la menopausia, pues ayuda a reducir la osteoporosis, además de mejorar la circulación venosa lo que disminuye el riesgo de trombosis venosa.

### ■ **¿Después de un tratamiento con ultracavitación o una liposucción, se puede realizar un tratamiento de presoterapia?**

Sí, de hecho es muy recomendable pues ayuda a la recuperación, ya que te ayuda a recuperar la figura eliminando líquidos y tejido graso. Además, evita la formación de pequeños trombos debidos a la intervención.

### ■ **¿Cuál es la presión recomendada para los tratamientos?**

La mayoría de tratamientos terapéuticos (edemas, linfoedemas, varices, recuperación post-traumática) se suelen tratar con una presión no superior a los 50 mm Hg. Las altas presiones (entre 60 y 120 mm Hg) están reservadas a los edemas muy fibrosos y a los tratamientos estéticos en pacientes que no padecen varices ni problemas vasculares.

# SUGERENCIAS **KINEFIS**

## ■ **CRIOTERAPIA + PRESOTERAPIA**



Antes de usar la presoterapia, puedes aplicarte el **gel de frío intenso Kinefis**, que completa el tratamiento de presoterapia al ofrecer una sensación instantánea de frescor y ligereza. Este gel crea un efecto de vasoconstricción seguido de una vasodilatación importante del sistema veno-linfático, permitiendo optimizar los efectos del tratamiento drenante. Estimula la circulación sanguínea y linfática, mejorando a la vez la elasticidad de la piel. Ideal para el tratamiento intensivo con la presoterapia en la retención de líquidos y piernas pesadas.

## ■ **Crema efecto circulatorio**



Crema que mejora la circulación, venosa, arterial y linfática. Indicada en todos los problemas circulatorios, como arañas vasculares, varices, sensación de piernas cansadas, retención de líquidos, etc. Después de su aplicación existe una agradable sensación de frescor que produce una descongestión de toda la zona tratada.

Composición: Ginkgo biloba, Vitis vinifera, Aesculus hippocastanum, Hamamelis virginiana. Es importante destacar la ausencia en este producto de aceites minerales derivados del petróleo.

## ■ **Pantalón presoterapia**



Pantalón monouso Kinefis para presoterapia. En tejido sin tejer de polipropileno. Con cintura elástica y pie cerrado. Hipoalergénico. No estéril.



tienda.**fisaude**.com

**Estamos en:** Calle Sierra Filabres 1. Polígono Industrial La Olivilla. 28946.  
Fuenlabrada (Madrid)  
**Teléfono:** 91 632 77 40  
**Mail:** tienda@fisaude.com