

Tratamientos manuales

3 PROGRAMAS A ESTIMULACIÓN CONSTANTE.

		PR	PW	
P12	Constante A	2 Hz	250 useg	RELAJANTE
P13	Constante B	10 Hz	150 useg	ENDORFINAS
P14	Constante C	100 Hz	50 useg	GATE CONTROL

Los valores que se muestran son los de partida, aunque pueden ser modificados por el terapeuta.

2 PROGRAMAS A ESTIMULACIÓN MODULADA

		FR	PW	modul time	
P15	Modulación A en Fr.	F1=40 Hz - F2=120 Hz	200 useg	5 seg	F2 ajustable
P16	Modulación B en Fr. Y Pw	F1=150 Hz - F2=70 Hz	50-200 useg	8 seg	F2 ajustable

3 PROGRAMAS DE TRENES DE IMPULSOS

		Frecuency	PW	Time	On	Off
P17	Burst A (I)	60 Hz	250 useg	2	1	1
P18	Burst B (II)	80 Hz	150 useg	1	0,5	0,5
P19	Burst C (III)	120 Hz	50 useg	0,5	0,25	0,25

Los valores que se muestran son los de partida, aunque pueden ser modificados por el terapeuta

Tratamientos predefinidos

12 PROGRAMAS “SECUENCIALES” PREDEFINIDOS DE ANALGESIA.

PREDEFINIDOS		Phase - A		Phase - B		Phase - C		TOTAL
		Program	Timer	Program	Timer	Program	Timer	TIMER
P0	CERVICALGIA	Modulated B	15 min	Burst C	10 min	Modulated A	15 min	40 min
P1	TORTICOLIS	BURS C	8 min	Mudulated B	8 min	Constante A	8 min	24 min
P2	LUMBALGIA	Modulated A	15 min	Burst A	10 min	Modulated B	15 min	40 min
P3	CIATICA	Constante C	15 min	Burst B	10 min	Modulated A	15 min	40 min
P4	EPICONDILITIS	Constante C	15 min	Burst A	10 min	Modulated A	15 min	40 min
P5	MANO-MUÑECA	Mudulated B	10 min	Burst B	10 min	Modulated A	10 min	30 min
P6	GONALGIA	Constante C	15 min	Burst A	10 min	Modulated A	15 min	40 min
P7	HOMBRO	Constante C	15 min	Burst A	10 min	Modulated A	15 min	40 min
P8	ESPALDA	Constante C	15 min	Burst C	10 min	Modulated A	15 min	40 min
P9	COXALGIA	Modulated A	15 min	Burst C	10 min	Modulated B	15 min	40 min
P10	MENSTRUAL	Moduladed A	8 min	Burst A	8 min	Modulated A	8 min	24 min
P11	NEURALGIA	Modulated A	8 min	Burst B	10 min	Burst C	8 min	26 min

Cada tratamiento predefinido contiene 3 secuencias Ⓐ Ⓑ Ⓒ, que optimizan el tratamiento. Los caracteres Ⓐ, Ⓑ o Ⓒ Se muestran en el display parpadeando para indicar la secuencia activa en cada momento y quedan encendidos una vez completada la misma.

ESTIMULACIÓN MUSCULAR

1 PROGRAMA UNIVERSAL PARA ESTIMULACIÓN MUSCULAR.

- **Constituido por 31 trenes de impulso diferentes programados en función la frecuencia seleccionada y de funcionamiento secuencial (las frecuencia tetanizantes incorporan durante el tiempo de reposo una frecuencia baja de recuperación). La anchura de pulso y la frecuencia son programables por el terapeuta.**

TRENES DE IMPULSO EMS

Ft (Hz(Tc))	(Ts)	(Tc)	(Tb)	(Tr)	Fr (Hz (Tr))
1	2	30	1	0	0
2	2	29	1	0	0
3	2	28	1	0	0
4	2	27	1	0	0
5	2	26	1	0	0
6	2	25	1	0	0
7	2	24	1	0	0
8	2	23	1	0	0
9	2	22	1	0	0
10	2	8	1	9	5
12	2	8	1	9	5
14	2	8	1	9	5
16	2	8	1	9	5
18	2	8	1	9	5
20	2	7	1	9	5
25	2	7	1	9	5
30	2	7	1	10	5
35	2	7	1	10	5
40	2	6	1	10	4
45	2	6	1	10	4
50	2	6	1	11	4
60	2	5	1	11	4
70	2	5	1	12	4
80	2	4	1	12	3
90	2	4	1	13	2
100	2	3	1	18	2
110	2	3	1	18	2
120	2	3	1	18	2
130	2	3	1	18	2
140	2	3	1	18	2
150	2	3	1	18	2