

**XPOLAR**

Dispositivo de recuperación deportiva X2

Manual de usuario

# Información del producto

Nombre: Dispositivo de recuperación deportiva Xpolar

Modelo: X2

Empresa: Shenzhen Jidong Intelligent Innovation Co., Ltd

Origen: Shenzhen, China

Ámbito de aplicación: Músculo humano y recuperación de tejidos blandos

Ámbito de aplicación: Recuperación de músculos y tejidos blandos humanos.

# Especificaciones

Dimensión: 335x315x50 mm

De color: negro

Peso: 1.2kg

Capacidad de la batería: 5000 mAh.


Consumo de energía: 42W

Entrada: 5V  2A / 5V  3A  
/ 9V  3A / 12V  3A / 15V  3A

\*Para usar mientras se carga, se requiere un adaptador de carga rápida PD de más de 45W

## Instrucciones de uso


Fije las tres correas a los anillos metálicos correspondientes. (Mire el velcro de las correas hacia arriba)

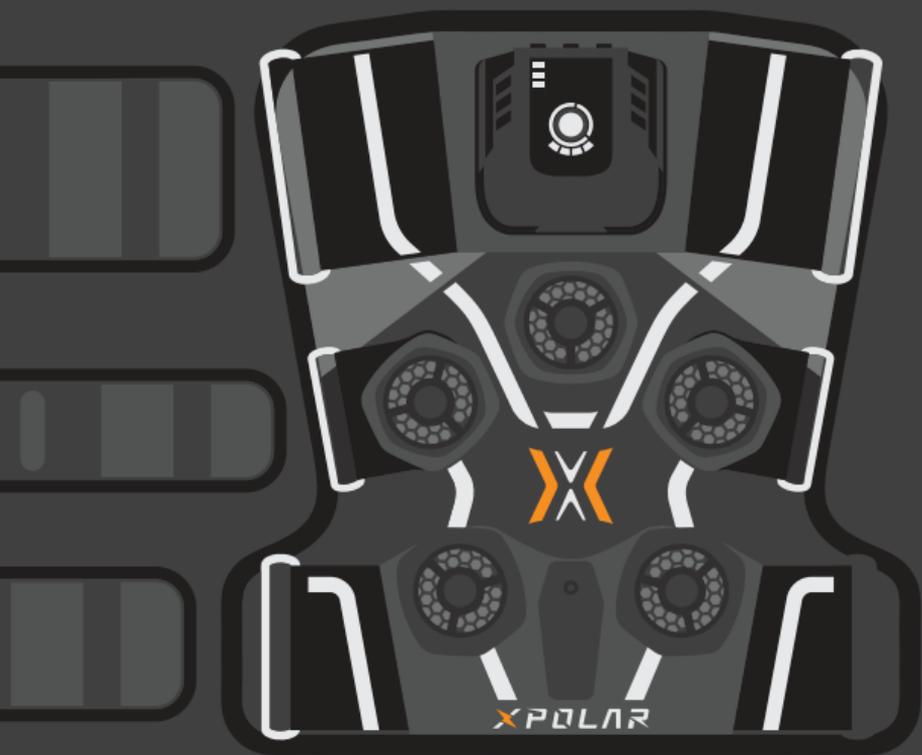


Endereza la pierna correctamente y alinea la rodilla con la marca 



Pase la correa a través del anillo de metal opuesto, gírela y asegúrela cómodamente.

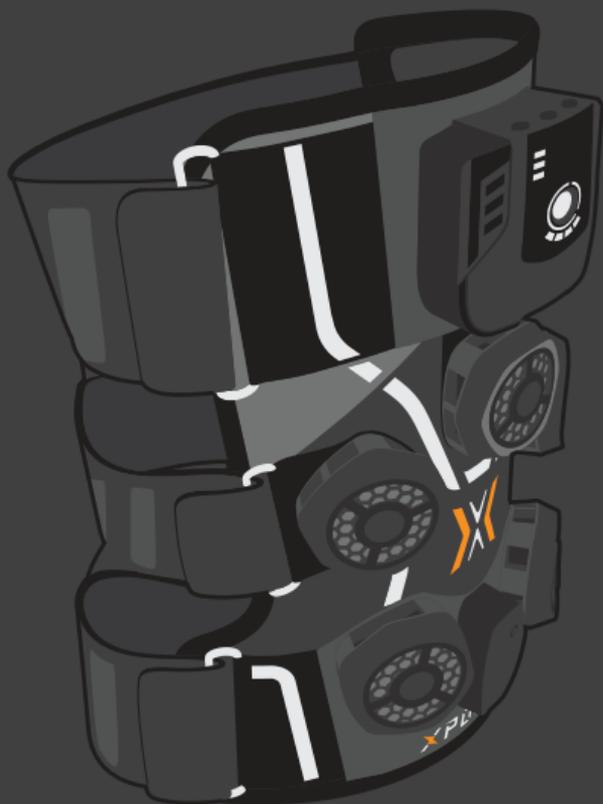

# Instrucciones de operación

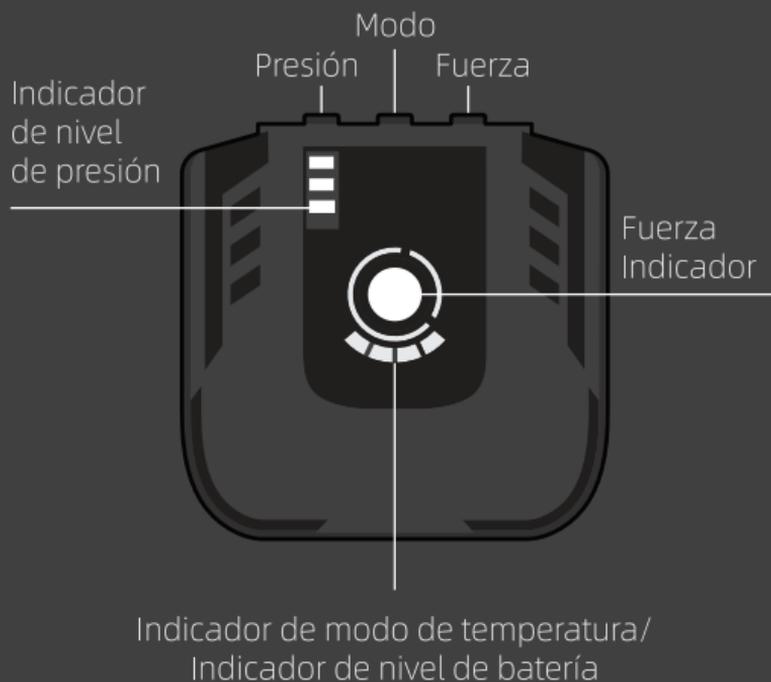

## Encendido

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos: la luz de encendido se vuelve blanca, las luces de nivel de batería indican secuencialmente la energía restante y el dispositivo vibra con dos destellos de la luz de presión, lo que indica que está encendido.

## Apagado

Mientras está encendido, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos: las luces de la batería se apagan, el dispositivo vibra y la luz de presión parpadea dos veces antes de apagarse.



# Modos de conmutación

Presione el botón MODE central para cambiar de modo.



Pausa



Compresión con frío



Compresión con calor



Calor suave



Calor / Frío



Frío / Calor

## Ajuste de la presión

Pulse el botón de presión; el número de segmentos iluminados indica el nivel de presión.



## Cargando

Inserte el cable de carga en el puerto de carga, la luz indicadora de encendido se iluminará en amarillo para indicar que la carga ha comenzado, se volverá verde y se detendrá automáticamente cuando esté completamente cargada.



**XPOLAR**

Dispositivo de recuperación X2

Precauciones/ Garantía del producto

# Precauciones

- Este producto está diseñado para ayudar en la recuperación después del ejercicio y el ajuste de la condición física, destinado principalmente a adultos y adolescentes sanos. Antes de utilizar este dispositivo, evalúe si el producto se adecúa a su persona.
- Problemas de la piel: las personas con alergias cutáneas, inflamación grave o heridas abiertas pueden experimentar una exacerbación debido a los cambios de temperatura o presión. En tales casos, se recomienda consultar a un profesional médico.
- Problemas circulatorios: las personas con afecciones como hipertensión o trastornos circulatorios deben consultar a un médico antes de usar este dispositivo, ya que las compresas frías y calientes pueden afectar la circulación.
- Efectos de los medicamentos: Los usuarios que toman medicamentos que podrían afectar la coagulación de la sangre o la sensibilidad deben buscar consejo médico antes de usar este dispositivo.

- Reacciones alérgicas y compatibilidad corporal: Asegúrese de que no haya alergias a los materiales del dispositivo y que la forma o tamaño del cuerpo sea adecuado para su uso. Es posible que tipos de cuerpo especiales no sean compatibles.
- Molestias durante el uso: si experimenta irritación de la piel, dolor o cualquier molestia, deje de usar el dispositivo inmediatamente y busque asesoramiento profesional.
- Uso en áreas sensibles: Evite usar el dispositivo directamente en áreas sensibles del cuerpo o partes con dolor inexplicable para evitar molestias o lesiones.

## Lavado y Almacenamiento del Producto

- No hierva el producto ya que puede causar deformación.
- No lavable a máquina; Para la limpieza, limpie la superficie con un paño húmedo.
- Evite el uso de dispositivos de secado; si está mojado, déjelo secar al aire libre de forma natural.

# Póliza de garantía

XPOLAR garantiza el servicio de garantía para el producto X2 a partir de la fecha de compra. El período de garantía del producto depende del tipo de componente específico y puede variar, con una duración máxima de 12 meses para diferentes componentes. Para obtener más información sobre el período de garantía y la política de servicio posventa, visite [xpolar-tech.com](http://xpolar-tech.com).

\*Las políticas de garantía pueden variar según las leyes y regulaciones locales.