

FICHA TÉCNICA

MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE TIPO IIR Negro

 **fisaude.com**

Especialistas en salud y deporte



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificaciones técnicas

Capas	3 capas con pliegues
Composicion	Capa exterior: SB PP no tejido Capa interior: soplados sin tejer Capa exterior: rodado en caliente no tejido
Uso	1 uso, maximo 4 horas
EFB	≥99%
Clasificación	Tipo IIR
Presión diferencial	<60 Pa/cm ²

Instrucciones de uso :

- En primer lugar, antes de colocar la mascarilla, es necesario lavarse las manos con un gel desinfectante a base de alcohol, o bien, con agua y jabón.
- Abrir la mascarilla y ajustar la forma.
- Colocar la mascarilla por debajo de la barbilla.
- Cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla y comprobar que no queden espacios libres.
- Una vez colocada, hay que comprobar que el ajuste es correcto para evitar fugas de aire.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas 17.5 x 9.5cm

Color Negro

Cantidad por caja 50pcs

EAN



- Exentas de latex
- Tiras de aluminio para su adaptación a la nariz
- Cumple con normativa EN14683:2019+AC:2019

